



Características

- Fabricado con 100% Nitrilo, de color naranja.
- Material de espesor extra, para una alta resistencia y protección.
- Superficie externa texturada tipo "piel de gallina", que mejora la adherencia tanto en seco como en húmedo.
- Superficie interna lisa.
- Exento de látex y polvo.
- No estéril.
- Artículo de un solo uso (desechable).
- Puño ajustable con reborde.
- Aptos para el uso en contacto con alimentos.
- Ambidiestro.
- AQL: 1.0
- Marca: Aachen Ultragrip.

Uso y aplicaciones



Debido al grosor y la alta resistencia del material, este guante proporciona al usuario una protección adicional en prácticas de alto riesgo. Su comodidad le hace, además, un producto idóneo para tareas en las que se manejen con frecuencia productos químicos y/o abrasivos y el tiempo de labor sea prolongado. Es apto para el ámbito doméstico, en limpieza y mantenimiento, industria de la alimentación, laboratorios, talleres, industrias químicas, ámbito sanitario, etc.

Cumplimiento de normativa

Reglamento (UE) 425/2016	De 9 de marzo de 2016, relativo a los equipos de protección individual y por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE (EPI Cat. III).
Reglamento (UE) 10/2011	De 14 de enero de 2011, sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.
EN ISO 374-1:2016/A1:2018	Terminología y requisitos de prestación para riesgos químicos.
EN ISO 374-2:2019	Determinación de la resistencia a la penetración.
EN 16523-1:2015+A1:2018	Resistencia a la permeabilidad de productos químicos .
EN ISO 374-4:2019	Determinación de la resistencia a la degradación por productos químicos.
EN ISO 374-5:2016	Terminología y requisitos de prestaciones para riesgos por microorganismos.
EN ISO 21420:2020	Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo.
EN 1186	Migración global
ASTM D 6319	Especificaciones para guantes de nitrilo de examen para uso médico
ASTM D 6124	Contenido residual de polvo
ISO 13485	Sistema de Calidad en Fabricación de Artículos Sanitarios.
ISO 9001	Sistema de Gestión de Calidad.
ISO 14001	Sistema de Gestión Medioambiental.

Medidas

Talla	Longitud (mm)	Anchura palma (mm)	Peso unidad (g)	Espesor (mm)		
				Puño	Palma	Dedos
S (6-7)	Min. 240	85 ± 5	7,7 ± 0,3	0,13 ± 0,03	0,13 ± 0,03	0,16 ± 0,03
M (7-8)		95 ± 5	8,0 ± 0,3			
L (8-9)		105 ± 5	8,5 ± 0,3			
XL (9-10)		115 ± 5	9,0 ± 0,3			
XXL (10-11)		> 120	9,5 ± 0,3			

Propiedades físico-químicas

Resistencia a Productos químicos			Nivel de protección química
Producto	Tiempo de paso (EN 16523-1)	Degradación (EN 374-4)	
K Hidróxido sódico (40%)	6 (tiempo de paso > 480 min)	-18,6%	Tipo B
P Peróxido de hidrógeno (30%)	4 (tiempo de paso > 120 min)	25,4%	
T Formaldehído (37%)	6 (tiempo de paso > 480 min)	-1,6%	

Propiedades físicas

Propiedad		Nivel de prestación/resultado	Norma de referencia
Elongación %	antes del envejecimiento	Mín. 500	ASTM D 6319
	después del envejecimiento	Mín. 400	
Tensión de estiramiento	antes del envejecimiento	Mín. 14 MPa	
	después del envejecimiento	Mín. 14 MPa	
Contenido residual en polvo		< 2 mg/guante	ASTM D 6124
Ensayo de fuga al aire		No hay fuga	EN 374-2
Ensayo de fuga al agua		No hay fuga	

Presentación

Envase: Caja dispensadora (estuche) con 50 unidades, con pestaña de fácil apertura en la parte superior para una cómoda extracción.

Embalaje: caja de 10 estuches (500 unidades).

Cada estuche lleva impreso los siguientes datos y pictogramas: denominación del producto en varios idiomas, razón Social y dirección, Talla, Número de Lote, Número de unidades que contiene, Código de barras, AQL 1.0.

Pictogramas:

	Protección frente a riesgos biológicos		Protección química		Marcaje CE y Organismo Notificado		Referencia Lote
	Uso único.		Calidad Alimentaria.		Exento de látex		No estéril
	Fecha de fabricación.		Fecha de caducidad.		Temperaturas y condiciones de almacenaje.		

Tallaje: Desde la S a la XXL. Diseño unitalla. Tanto cajas como estuches vienen con la correspondiente talla señalizada.


Referencias

Tallas	Referencias	GTIN/EAN caja	GTIN/EAN estuche
S (6-7)	GNN.U01.10	8435027116052	8435027116090
M (7-8)	GNN.U02.10	8435027116069	8435027116106
L (8-9)	GNN.U03.10	8435027116076	8435027116113
XL (9-10)	GNN.U04.10	8435027116083	8435027116120
XXL (9-10)	GNN.U05.10	8435027116137	8435027117318

Medidas logísticas


Estuche (aprox.)

24 x 12 x 7 cm

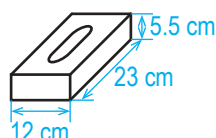

Caja (aprox.)

28 x 25,2 x 24 cm

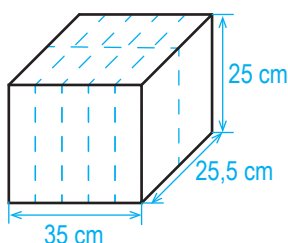

Peso bruto caja (aprox.)

Talla	Peso (Kg)
S (6-7)	4,8
M (7-8)	5,0
L (8-9)	5,3
XL (9-10)	5,7
XXL (10-11)	6,0

Medidas logísticas

Almacenar en lugar seco y aireado con temperaturas entre 5 °C y 35 °C. Proteger de la luz solar.

Folleto Informativo

El envase muestra, en su parte posterior, el folleto informativo, incluyendo los resultados obtenidos en base a las normas de aplicación:

Folleto informativo • Technical brochure

ES Este producto se ha fabricado siguiendo las exigencias del Reglamento (EU) 2016/425, para su uso básico, según la norma EN ISO 21420:2020, requisitos generales para los guantes, EN ISO 374-1:2016/A1:2018 protección contra productos químicos y EN ISO 374-5:2016 protección contra microorganismos y virus, que le son aplicables según consta en el certificado de examen UE de Tipo emitido por SATRA Technology Europe Limited, Braetown Business Park, Clonee, D15YN2P, Republic of Ireland, Organismo Notificado 2777.

Recomendaciones de uso:

El objetivo del EPI tipo guante de nitrilo sin polvo no estéril "AACHEN ULTRAGRIP", confeccionado con nitrilo 100% en color naranja es proteger al usuario contra:

- Suciedad, menos las sustancias nocivas.
- Microorganismos y virus.
- Productos químicos especificados.

Recomendaciones contra el mal uso:

- Nunca debe usarse el presente EPI frente a otros riesgos que los anteriormente descritos.
- Producto de un solo uso (desechable).
- Antes de su uso, inspeccionar el guante ante cualquier defecto o imperfección.
- La suciedad perjudica las prestaciones del guante.
- Este producto puede contener sustancias que provoquen reacciones alérgicas (dermatitis), como por ejemplo, acelerantes.
- No debe emplearse cuando existe el riesgo de atrapamiento por partes móviles de máquinas.
- Se recomienda comprobar que los guantes son adecuados para el uso previsto debido a que las condiciones en el lugar de trabajo pueden diferir de la prueba de tipo en función de la temperatura, la abrasión y la degradación.
- La resistencia química se ha evaluado en condiciones de laboratorio a partir de muestras tomadas sólo de la palma y se refiere únicamente al producto químico ensayado. Esta información no refleja la duración real de la protección en el lugar de trabajo y la diferenciación entre mezclas y productos químicos puros.
- En el uso, los guantes de protección pueden proporcionar menor resistencia a los productos químicos por cambios en sus propiedades físicas: movimientos, enganchones, fricciones, degradación causada por contacto químico, etc. Para productos químicos corrosivos la degradación puede ser el factor más importante a considerar en la selección del guante.
- La resistencia a la penetración ha sido realizada bajo condiciones de laboratorio y relativo solamente a la muestra testada.

EN This product has been manufactured following the requirements of Regulation (EU) 2016/425, for its basic use, according to the standard general requirements for gloves, EN ISO 374-1:2016/A1:2018 protection against chemical products and EN ISO 374-5: 2016 protection against microorganisms and viruses, which are applicable, stated in the EU Type examination certificate issued by SATRA Technology Europe Limited, Braetown Business Park, Clonee, D15YN2P, Republic of Ireland, Notified Body 2777.

Recommendations for use:

The purpose of the non-sterile powder free nitrile glove "AACHEN ULTRAGRIP" PPE type, made with 100% nitrile in orange color, is to protect the user against:

- Dirt, as long as they are not harmful substances.
- Microorganisms and viruses.
- Specified chemical products.

Recommendations against wrong use:

- This PPE should never be used against other risks than those described above.
- For single use only (disposable).
- Before use, inspect the glove for any defect or imperfection.
- Dirt damages the performance of the glove.
- Limited use PPE due to its low transmission and absorption of water.
- This product may content substances that cause allergic reactions (dermatitis), i.e. accelerators.
- It should not be used when there is a risk of entrapment by moving parts of machines.
- It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use, because the conditions in the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation.
- Chemical resistance has been evaluated in laboratory conditions from samples taken only from the palm and refers only to the chemical tested. This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the differentiation between mixtures and pure chemicals.
- In use, protective gloves can provide less resistance to chemicals due to changes in their physical properties: movements, snagging, friction, degradation caused by chemical contact, etc. For corrosive chemicals degradation can be the most important factor to consider in the selection of the glove.
- Penetration resistance has been carried out under laboratory conditions and relative only to the sample tested.

Resultados permeación química / Chemical permeation results:

Cod.	Producto químico Chemical product	Resultado permeación Permeation results EN 16523-1:2015 + A1:2018	Resultado degradación Degradation results EN ISO 374-4:2019
K	Hidróxido Sódico 40%	Nivel/level 6 (>480 min)	-18,6 %
P	Peróxido de Hidrógeno 30%	Nivel/level 4 (>120 min)	25,4 %
T	Formaldehído 37%	Nivel/level 6 (>480 min)	1,6 %

Tempo de paso/Breakthrough time (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480	
Nivel de prestación/Performance level	1	2	3	4	5	6	

Estanqueidad / Watertightly determination (EN ISO 374-2:2019):

Ensayo de fuga de aire / Air leak test	Cumple / Pass
Ensayo de fuga de agua / Water leak test	Cumple / Pass

Protección contra microorganismos/Protection against microorganisms (EN ISO 374-5:2016):

Protección contra bacterias y hongos / Protection against bacteria&fungi	Cumple / Pass
Protección contra virus / Protection against viruses	Cumple / Pass

Talla (Correspondencia según EN 420) Size (Correspondence according to EN 420)	Longitud de la mano del usuario Length of the user's hand (mm)	Perímetro de la mano del usuario Perimeter of the user's hand (mm)
5-6 XS	Min. 240	172 - 152
6-7 S		152 - 178
7-8 M		178 - 203
8-9 L		203 - 229
9-10 XL		229 - 255

COLOCACIÓN DE LOS GUANTES / DONNING OF GLOVES



CÓMO QUITARSE LOS GUANTES / REMOVING OF GLOVES



CV
www.cvprotection.com

Celulosas Vascas, S.L.
P.E. Boroa, parcela 2A-1B, 48340, Amorebieta - Bizkaia (Spain)
www.cvprotection.com • +34 944 520 115 • cv@cvprotection.com



Evaluación de la conformidad (Módulo C2) realizado por / Ongoing Conformity (Module C2) carried out by: SATRA Technology Europe Limited, Braetown Business Park, Clonee, D15YN2P, Republic of Ireland.



**CONTENIDO
/ CONTENT:**
**50
guantes / gloves**



Para más información consulte la ficha técnica. Se recomienda no desechar el envase hasta haber agotado todo su contenido. Descarga la Declaración UE de conformidad en nuestra web: <https://cvprotection.es/producto/guante-de-nitrilo-aachen-ultragrip/>

For more information consult the technical sheet. It is recommended not to discard the container until all its content is over. Download EU declaration of conformity from our website: <https://cvprotection.com/product/nitrile-gloves-aachen-ultragrip/>

Nº revisión	Fecha	Revisión
R0	13/06/2018	Elaboración inicial
R1	20/11/2023	Revisión del etiquetado
R2	15/01/2025	Inclusión talla S